



در حالت عادی و برای استوماهای طبیعی، از چسب‌هایی استفاده می‌شود که صاف و مسطح است. اما بعضی اوقات، استوما همسطح با پوست یا حتی فرورفته است، یا اینکه در یک فرورفتگی یا چین شکمی قرار گرفته است. در چنین حالتی بهتر است از چسب‌هایی استفاده شود که محدب (Convex) است زیرا:

- استوما را قدری بیرون می‌آورد تا تخلیه مستقیم مواد دفعی به داخل کیسه بهتر صورت گیرد.
- از نشت ترشحات و آسیب به پوست پیشگیری می‌کند.

کلوپلاست امکان استفاده از این چسب‌ها را هم در سیستم یک تکه و هم دوتکه برای استومیت‌ها فراهم آورده است و استومیت‌ها می‌توانند متناسب با شرایط خود هر کدام از سیستم محدب یک تکه یا دوتکه را انتخاب کنند.

علاوه بر این، در سیستم دوتکه، چسب‌های پایه محدب به دو صورت محدب ملایم (Light Convex) و محدب عمیق (Deep Convex) طراحی شده است.

برای استوماهای همسطح با پوست، چسب محدب ملایم و برای استوماهای فرورفته، چسب محدب عمیق استفاده می‌شود.



دفع گاز از استوما به ویژه در افراد کولوستومی یکی از نگرانی‌های این افراد است زیرا اگر فیلتر به خوبی عمل نکند، نشت ترشحات اتفاق می‌افتد. کیسه باد می‌کند و با وجود تعویض کیسه بوی زیادی منتشر می‌شود. فیلتر قوی برای خشی کردن بو و کاهش احتمال باد شدن در هر دو نوع کیسه‌های ته بسته و ته باز تعبیه شده است. این فیلتر توسط یک

پیش فیلتر (پوشش اطراف فیلتر) محافظت می‌شود که احتمال مدود شدن آن را توسط مواد دفعی به حداقل می‌رساند. همچنین به منظور پنهان ماندن آن زیر لباس، رنگ فیلتر مشابه پوست می‌باشد.

خروجی مخفی

باز و بسته کردن خروجی کیسه در محصولات کلوپلاست بدون نیاز به گیره است و با چسب اسکاچی که در دوطرف خروجی قرار گرفته است، بسته می‌شود. به همین علت استفاده از آن آسان و بهداشتی است. بسته شدن کیسه در این سیستم کاملاً ایمن است و مواد دفعی از آن خارج نمی‌شود. علاوه بر این خروجی زیر پوشش نرم تا می‌شود و قابل رویت نیست.

پوشش نرم

الیاف پوشش نرم در زیر و روی کیسه، هنگام تماس با پوست، احساس راحتی به بیمار می‌دهند. این الیاف نسبت به آب نفوذناپذیر هستند و بعد از استحمام به راحتی خشک می‌شوند. به منظور پنهان ماندن کیسه در زیر لباس، الیاف نرم روی همه کیسه‌ها بژ است.

محصولات جانبی استومی

آسایش و محافظت بیشتر

به منظور پیشگیری از مشکلات و عوارض استومی و درمان سریع آن‌ها، استفاده از محصولات جانبی استومی توصیه می‌شود. در اینجا کاربرد هر یک از این محصولات توضیح داده شده است.

کرم محافظ براوا

- پیشگیری و درمان التهاب، خشکی و آسیب‌های پوستی
- جلوگیری از آسیب‌های ناشی از چسبیدن چسب کیسه به پوست

اسپری محافظ براوا

- بدون احساس سوزش
- جلوگیری از مشکلات پوستی حاصل از مواد دفعی و چسب‌ها
- بدون ایجاد اختلال در چسبندگی چسب
- بدون ایجاد اختلال در تنفس پوست

اسپری جداکننده چسب براوا (Remover)

- بسیار سازگار با پوست
- جدا کردن آسان چسب کیسه یا بقایای چسب از روی پوست
- بدون ایجاد اختلال در چسبندگی چسب
- قابلیت تخلیه کامل اسپری

پد جداکننده براوا (Remover)

- بسیار سازگار با پوست
- جدا کردن آسان بقایای چسب از روی پوست
- بدون ایجاد اختلال در چسبندگی چسب

حلقه محافظ انعطاف پذیر براوا

- محافظت طولانی مدت پوست در مقابل نشت
- اتصال مطمئن بین پوست و چسب پایه
- مقاوم در مقابل حل شدن و از هم گسیختگی
- حالت پذیری بالا و استفاده راحت

پودر محافظ استومی براوا

- جذب رطوبت زیاد پوست
- بهبود التهاب پوستی و خیس خوردگی

پانسمان محافظ استومی براوا

- ترمیم و التیام زخم اطراف استوما، فیستول پوستی یا زخم‌هایی که بر اثر ترشحات بدن یا آگزودای زخم ایجاد شده‌اند.
- جذب رطوبت و ترشحات و پیشگیری از حساس شدن پوست
- دارای انعطاف پذیری و قابل برش برای استوما با اندازه‌های مختلف

محصولات استومی کلوپلاست

کد محصول	تخلیه کیسه	رنگ کیسه	کیسه های دو تکه آلترا پیشرفته
۱۳۹۸۶	ته باز	مات	
۱۳۹۷۶	ته باز	شفاف	
۱۷۶۵۲	ته بسته	مات	
۱۴۲۲۹	شیردار	شفاف	

کد محصول	نوع چسب	تحدب چسب	برش چسب	چسب پایه آلترا پیشرفته
۱۷۷۱۰	آلترا	صاف	قابل برش تا ۵۵ میلی‌متر	
۱۷۷۲۰	آلترا Longwear	صاف	قابل برش تا ۵۵ میلی‌متر	
۱۷۷۳۲	آلترا	کانوکس ملایم	قابل برش تا ۴۳ میلی‌متر	
۱۷۷۴۱	آلترا اکسترا	کانوکس ملایم	قابل برش تا ۴۳ میلی‌متر	
۱۷۷۶۳	آلترا اکسترا	کانوکس عمیق	قابل برش تا ۴۳ میلی‌متر	

کد محصول	تخلیه کیسه	رنگ کیسه	برش چسب	کیسه های یک تکه آلترا پیشرفته
۱۷۵۰۰	ته باز	مات	قابل برش تا ۷۵ میلی‌متر	
۱۷۵۰۱	ته باز	شفاف	قابل برش تا ۷۵ میلی‌متر	
۱۳۵۳۳	ته بسته	مات	قابل برش تا ۷۵ میلی‌متر	
۱۵۵۸۰	شیردار	مات	قابل برش تا ۵۵ میلی‌متر	
۱۷۵۲۲	شیردار	شفاف	قابل برش تا ۵۵ میلی‌متر	
۱۷۵۰۷	ته باز	مات	کیسه اطفال - قابل برش تا ۶۵ میلی‌متر	

کد محصول	تخلیه کیسه	رنگ کیسه	برش چسب	کیسه های یک تکه آلترا کانوکس
۱۷۴۷	ته باز	مات	قابل برش تا ۴۳ میلی‌متر	
۱۷۴۴	ته بسته	مات	قابل برش تا ۴۳ میلی‌متر	
۱۷۴۸	شیردار	شفاف	قابل برش تا ۴۳ میلی‌متر	

کد محصول	تخلیه کیسه	رنگ کیسه	برش چسب	کیسه Post Op
۱۲۸۰	شیردار	شفاف	قابل برش تا ۱۰۰ میلی‌متر	

کد محصول	نام محصول	مورد استفاده	محصولات جانبی استومی
۱۲۰۰۰	کرم محافظ براوا	محافظت و بهبود التهابات پوستی	
۱۲۰۲۰	اسپری محافظ براوا	جلوگیری از مشکلات پوستی حاصل از مواد دفعی و چسب‌ها	
۱۲۰۱۰	اسپری جدا کننده چسب براوا	جدا کردن آسان چسب کیسه یا بقایای چسب از روی پوست	
۱۲۰۱۱	پد جداکننده براوا	جدا کردن آسان بقایای چسب از روی پوست	
۱۲۰۳۰	حلقه محافظ انعطاف پذیر براوا	محافظت طولانی مدت پوست در مقابل نشت	
۱۹۰۷	پودر محافظ استومی براوا	بهبود التهاب پوستی و خیس خوردگی	
۱۲۰۷۰	نوار الاستیک براوا	جلوگیری از بلند شدن و شل شدن چسب پایه	
۲۶۵۰	خمیر استومی	هموار کردن پوست و جلوگیری از نشت	
۳۲۱۵	پانسمان محافظ استومی	ترمیم و پیشگیری از زخم‌های پوستی	
۲۲۲۰	کیسه درناژ استریل	کنترل مواد دفعی فیستول یا درن	
۲۲۵۰	کیسه درناژ	کنترل مواد دفعی فیستول یا درن	
۴۲۱۰	کمر بند استومی	اطمینان بیشتر نسبت به تثبیت کیسه	

تهران، خیابان بزرگمهر، نبش خیابان سرپرست، شماره ۳۳
 واحد فروش: ۰۲۱) ۶۴۸۴۸۰ کمک: ۰۲۱) ۶۴۸۴۵۰
 ۰۹۰۱-۸۰۱۹۳۵۴
 www.coloplast.ir



محصولات مراقبت از استومی کلوپلاست

راهنمای انتخاب برای استومیت‌ها و درمانگران





استفاده از محصولات مراقبت از استومی مناسب، مهمترین نقش را در کیفیت زندگی یک استومیت ایفا می‌کند. مدمات استفاده از کیسه‌های غیر استاندارد به راحتی قابل جبران نیستند. بنابراین یکی از مسئولیت‌های اساسی پرستار استومی ارائه راهنمایی‌های لازم به استومیت برای انتخاب مناسبترین گزینه از بین سایر گزینه‌ها است.

محصولات، خدمات و مراکز عرضه کننده محصولات کلویلاست در ایران روز به روز در حال گسترش هستند. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد با ما تماس بگیرید.

سیستم دوتکه

در این کیسه‌ها چسب و کیسه از یکدیگر جدا می‌باشد پس :

- بدون برداشتن چسب می‌توان کیسه را تعویض نمود.
- تخلیه گاز از سیستم دوتکه راحت تر است یعنی با جداکردن کیسه از چسب پایه گاز به راحتی تخلیه می‌شود.
- قابلیت اتصال به کمربند را دارد و به این ترتیب ایمنی بیشتری را برای استومیت فراهم می‌کند.

این کیسه‌ها خود به سه شکل ته بسته، ته باز و شیردار می‌باشد :



سیستم دوتکه – ته بسته



سیستم دوتکه – ته باز



سیستم دوتکه – شیردار

در کولوستومیت‌ها استفاده می‌شود. کیسه‌ها باید پس از هر بار دفع تعویض شود اما چسب پایه می‌تواند حداکثر ۲ روز بر روی پوست بماند.

در اینلوستومیت‌ها استفاده می‌شود. کیسه باید روزانه تعویض شود اما چسب پایه می‌تواند حداکثر تا ۲ روز بر روی پوست بماند.

در انتهای این کیسه‌ها دریچه‌ای تعبیه شده است که پس از هر بار دفع، استومیت می‌تواند از طریق آن محتویات درون کیسه را تخلیه کند.

در پوروستومیت‌ها استفاده می‌شود. کیسه باید روزانه تعویض شود اما چسب پایه می‌تواند حداکثر تا ۲ روز بر روی پوست بماند.

در انتهای این کیسه‌ها شیری تعبیه شده است که استومیت می‌تواند از طریق آن محتویات داخل کیسه را تخلیه کند. همچنین شیر تخلیه قابلیت نصب شدن به کیسه ادرار را دارد پس هنگام خواب شبانه، استومیت دیگر نگران پرشدن کیسه نمی‌باشد.



یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد سیستم دوتکه کلویلاست حلقه اتصال‌دهنده آن است. روی چسب پایه حلقه‌ای است که با حلقه کیسه جفت و به یکدیگر قفل می‌شوند. علاوه بر این، قفل مخصوصی بر روی چسب و کیسه قرار دارد که با قفل شدن آن استومیت می‌تواند صدای "کلیک" را بشنود و از قفل شدن کیسه و چسب به یکدیگر کاملا مطمئن شود.

این سیستم باعث می‌شود استومیت از وارد کردن فشار به شکم خود خودداری کند. همچنین قبل از قفل کردن، حلقه کیسه به راحتی بر روی چسب پایه می‌چرخد و استومیت می‌تواند کیسه را در وضعیت دلخواه خود قرار دهد.

سیستم یک تکه

در این کیسه‌ها چسب و کیسه به یکدیگر متصل است.

به طور کلی کیسه‌های یک تکه در استومیت‌هایی با مشکلات بینایی، حرکت انگشتان و فتق اطراف استوما پیشنهاد می‌شود.

این کیسه‌ها خود به سه شکل ته بسته، ته باز و شیردار می‌باشد :



کیسه‌های یک تکه – ته بسته



کیسه‌های یک تکه – ته باز



کیسه‌های یک تکه – شیردار

در کولوستومیت‌ها استفاده می‌شود و باید پس از هر بار دفع تعویض شود.

در اینلوستومیت‌ها استفاده می‌شود و باید روزانه تعویض شود.

در انتهای این کیسه‌ها دریچه‌ای تعبیه شده است که پس از هر بار دفع، استومیت می‌تواند از طریق آن محتویات داخل کیسه را تخلیه کند.

در پوروستومیت‌ها استفاده می‌شود و باید روزانه تعویض شود.

در انتهای این کیسه‌ها شیری تعبیه شده است که استومیت می‌تواند از طریق آن محتویات داخل کیسه را تخلیه کند. همچنین شیر تخلیه قابلیت نصب شدن به کیسه ادرار را دارد پس هنگام خواب شبانه، استومیت دیگر نگران پرشدن کیسه نمی‌باشد.

چسب کیسه‌های کلویلاست

چسب کیسه استومی مهمترین جزء آن است زیرا باعث اتصال کیسه به بدن استومیت می‌شود. کلویلاست با بیش از پنجاه سال تجربه و تخصص در زمینه محصولات استومی همواره به فکر نوآوری و خلاقیت برای بهبود کیفیت محصولات خود بوده است. از اینرو چسب بکار رفته در این محصولات نیز از نوعی ساختار خاص برخوردار است که تمام ویژگی‌های یک چسب مناسب شامل چسبندگی مناسب، جداشدن ملایم، جلوگیری از خوردگی، جذب رطوبت، حفظ انسجام، حفظ PH پوست و انعطاف پذیری بالا را بطور متناسب دارا است.


چسب رولتی آلترا پیشرفته (Alterna® Enhanced)

چسبی منحصر به فرد در دنیا است. این چسب از ترکیب حلقوی دو نوع چسب مختلف با یکدیگر تشکیل شده است، که بصورت دایره‌های تیره و روشن یک در میان دیده می‌شود و برای همین چسب رولتی نام گرفته است. این چسب مجموعه نیازهای استومیت را بطور متعادل فراهم می‌کند.



یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد کیسه‌های پوروستومی کلویلاست داشتن دریچه بی بازگشت (Non-Return Valve) است. این دریچه مانع از بازگشت ادرار از کیسه به استوما و در نتیجه عفونت ادراری می‌شود و استومیت از عدم بازگشت ادرار هنگام خواب یا انجام فعالیت‌های فیزیکی مطمئن است.

ویژگی دیگری که این کیسه‌ها دارند، خاصیت چند محفظه ای آن است. طراحی چند محفظه ای باعث مسطح شدن بیشتر کیسه و در نتیجه پنهان ماندن آن زیر لباس می‌شود. همچنین این طراحی، باعث کاهش صدای ریزش ادرار به داخل کیسه می‌شود.

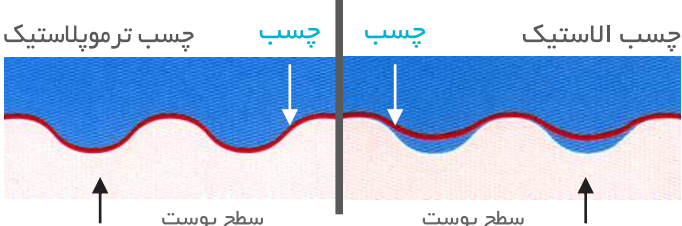

چسب رولتی آلترا با داشتن ماده پکتین (Pectin)، امکان حفظ PH پوست را در حد مطلوب، که بین ۵ و ۶ است، فراهم می‌کند. این چسب، بیضی شکل است و شش نقطه انعطاف پذیر در لبه چسب وجود دارد که کمی نازک تر از قسمت‌های دیگر آن هستند. نواحی نازک تر، انعطاف پذیری بیشتری ایجاد می‌کنند و حین خم و راست شدن بدن حرکت استومیت را تسهیل می‌کنند.

همچنین علامت قرمز رنگ گوشه جدا شدنی به استومیت کمک می‌کند که به راحتی نوار رویی را جدا کند.

این چسب به دو صورت آلترا (Alterna) و آلترا اکسترا (Alterna Extra) موجود است.

چسب رولتی آلترا اکسترا (Alterna Extra)

به همان صورت رولتی است اما ویژگی مقاومت در برابر خوردگی و حفظ انسجام در تماس با مواد دفعی در آن تقویت شده است. به این ترتیب چسب رولتی آلترا اکسترا چسبی مناسب برای افراد پوروستومی و اینلوستومی است و از پوست آنها در مقابل مواد دفعی حفاظت می‌کند.

این چسب ظاهری شفاف دارد و قدرت چسبندگی و همچنین انعطاف پذیری آن از سایر چسب‌ها بیشتر است.

